



Guía rápida


RENASYS[◇] TOUCH

Terapia de presión negativa

Smith+Nephew

1. Cambio del dispositivo entre la terapia continua y la intermitente

Para cambiar entre la terapia continua e intermitente, asegúrese de que la terapia está en pausa y presione el modo de terapia en la pantalla de inicio.

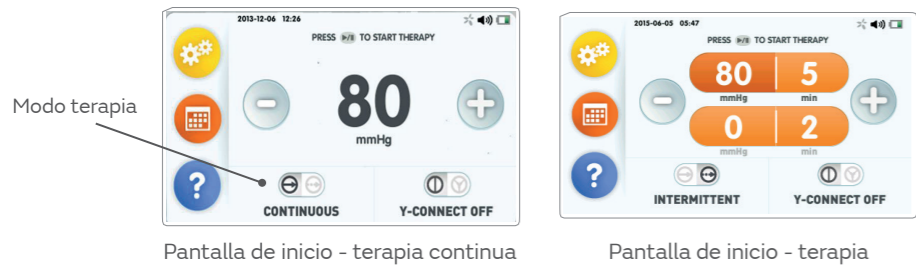

2. Inicio de terapia (continua)

- Paso 1:** Asegúrese de que el dispositivo está encendido y en la pantalla de inicio aparece el modo continuo.
 - Paso 2:** Use los botones de + o - para programar la presión necesaria.
 - Paso 3:** Presione el botón de inicio para comenzar la terapia.
- Cuando la terapia está activa, el indicador de estado de la parte superior del dispositivo se ilumina en luz verde y en la pantalla en la parte superior derecha aparece el logo en color naranja rotando.



3. Inicio de terapia (intermitente)

- Paso 1:** Asegúrese de que el dispositivo está encendido y en la pantalla de inicio aparece el modo intermitente.
- Paso 2:** Cambie los valores de presión y los ciclos de tiempo con los botones + o -.
- Paso 3:** Presione el botón de inicio para liberar la presión negativa.

Cuando la terapia está activa, el indicador de estado de la parte superior del dispositivo se ilumina en luz verde y en la pantalla, en la parte superior derecha aparece el logo en color naranja rotando.



Los 4 ajustes pueden modificarse dentro de los siguientes rangos de presión:

Terapia alta:
25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200mmHg

Tiempos de ciclos baja: 3, 5, 8, 10 minutos

Terapia baja:
0, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180mmHg

Tiempos de ciclos bajos: 2, 3, 5, 8, 10 minutos

4. Comprobación del sellado

Siga las instrucciones de la pantalla, una vez se ha conseguido el sellado, aparecerá un mensaje "Sellado logrado" y posteriormente "Liberando terapia".

Observe que se lleva a cabo el vacío.
Escuche si hay alguna posible pérdida de vacío.
Sienta el apósito debería estar duro al tacto.

Posible pérdida de vacío

- Arruga o pliegue del apósito.
- Arruga en la piel o grieta.

Actuación
Selle los bordes con film transparente para asegurar que no hay pérdida de vacío.



5. Bloquear la pantalla

La función de bloquear la pantalla bloquea el botón de inicio/pausa, el botón de encendido no se bloquea. El indicador de estado continua iluminado en verde para avisar que el dispositivo sigue liberando presión negativa.





Cuando se libera la terapia, la pantalla se oscurece, presionando los botones de inicio o bloqueo se vuelve a iluminar. En el caso de que suene una alarma, el dispositivo automáticamente se desbloquea y aparece el mensaje de alarma en la pantalla. Transcurridos 5 minutos de inactividad el dispositivo se bloqueará automáticamente y entrará en modo de hibernación.

6. Cambio entre modo paciente y clínico

Paso 1: Presione el botón amarillo de ajustes para cambiar la configuración.



Paso 2: Presione del menú la opción de "Cambio Modo".

Paso 3: Seleccione el modo requerido (Clínico/Paciente).

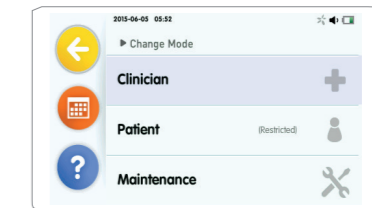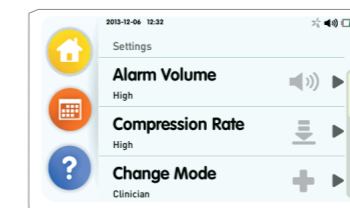

Paso 4: Por favor introduzca la clave (3141) y presione el "visto" verde para cambiar modos.

Paso 5: Presione dos veces el botón amarillo para regresar a la pantalla de inicio.

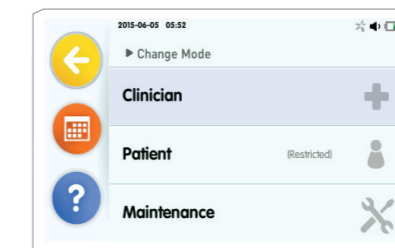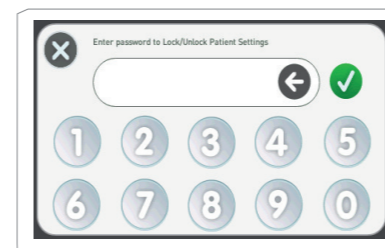

Curación de heridas
Smith+Nephew, S.A.U.
Fructuós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí
(Barcelona)
Tel.: 93 373 73 01

www.smith-nephew.es
Ver 1.0 | MPAWD_GRR | 12/2019
◇ Marca registrada de Smith+Nephew
© Diciembre 2019

Teléfono de soporte técnico:
93 373 73 01